

GERÇEK SONUÇLAR

ÖNCESİ



SONRASI



1 truSculpt seansı

Fotoğraflar: Dr. Omar Noor izniyle

ÖNCESİ



SONRASI



1 truSculpt seansı

Fotoğraflar: Dr. Edward Alvarez izniyle

ÖNCESİ



SONRASI



1 truSculpt seansı

Fotoğraflar: Dr. Omar Noor izniyle

Sonuçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

TRUSCULPT İLE
DAHA GÜÇLÜ
DAHA SIKI
DAHA FİT

TRUSCULPT:

TruSculpt uygulamasına ilişkin kontrendikasyonlar, önlemler, uyarılar, yan etkiler ve olası advers olaylar hakkında detaylı bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzunu ve uygulama rehberini inceleyiniz.

REFERANSLAR:

1.truSculpt Klinik Uygulama Rehberi, Cutera, Inc. 2.Şirket İçi Veriler, Cutera, Inc. 3.Somenek MT, Ronan SJ, Pittman TA. Lasers in Surgery and Medicine. 2021;53(3):337-343. 4.Napekoski KM, Ronan SJ, Pocock GM. Tek Seans 15 Dakikalık Monopolar Radyofrekans Uygulaması Sonrası İnflamatuvar Yanıt ve Adiposit Hücre Ölümü [Beyaz Kitap, Cutera Inc.]. 2018. 5.Jesitus J. truSculpt iD ile Kişiyi Özel Uygulamalar. The Aesthetic Guide. Eylül/Ekim 2018. 6.Chapas A, Dover JS, Kilmer SL ve ark. Modern Aesthetics. 2019;1-8.

truBody®

truSculpt®
truFlex™


ATT®
MEDİKAL - ESTETİK - KOZMETİK

@attmedikal @cutera.turkiye
info@att.com.tr | www.att.com.tr
444 0 625

CUTERA®
A New Energy in Aesthetics

©2026 ATT Medikal. Tüm hakları saklıdır. AOG2026

truSculpt®

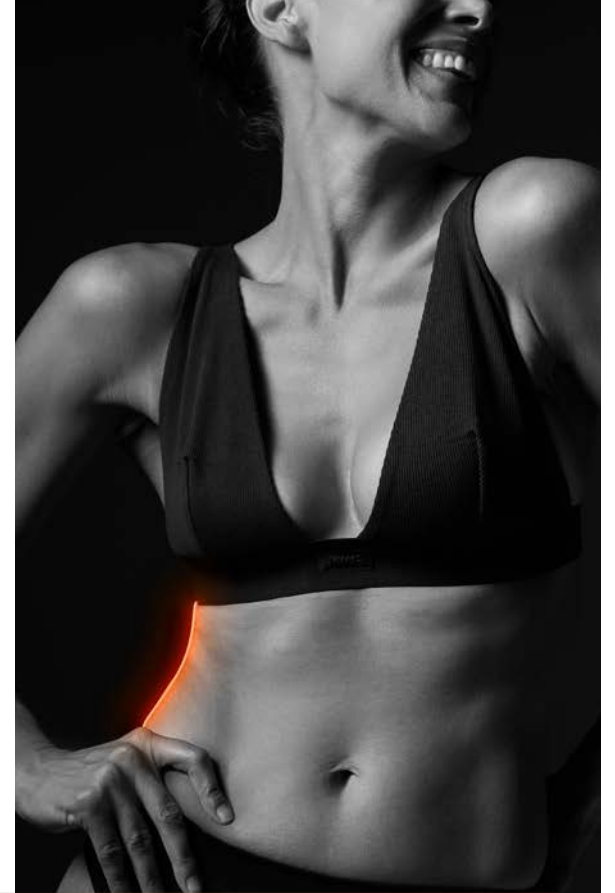

BÖLGESEL
İNCELME &
KAS
ŞEKİLLENDİRME

15 Dakikada Daha Fit
ve Sıkı Bir Görünüm

Model kullanılmıştır. Gerçek hasta değildir.

truSculpt®

İNATÇI BÖLGESEL YAĞLARA KARŞI HIZLI VE ETKİLİ

TruSculpt ile vücut şekillendirmede yeni bir dönemi keşfedin! Diyet ve egzersize rağmen inatçı yağ birikimlerinin bulunduğu bölgeleri hedeflemeye yardımcı olan bu kişiselleştirilebilir uygulama, daha şekilli fit bir vücut görünümünün desteklenmesine yardımcı olur.^{1,2}

Uygulama Bölgesinde
Ortalama ,

%24

Yağ Kaybı ³

NEDEN TRUSCULPT?



Non-invaziv ve konforlu uygulama deneyimi^{1,3}



İyileşme süresi gerektirmez^{1,3}



Yalnızca 15 dakikalık hızlı seanslar¹



Lokalize yağ birikimlerinin bulunduğu bölgeleri hedefler¹



Aynı anda birden fazla bölgeye uygulanabilir.¹ Tüm cilt ve vücut tipleri için uygundur.¹

TRUSCULPT

NASIL ÇALIŞIR?

TruSculpt, non-invaziv monopolar radyofrekans teknolojisi kullanarak hedeflenen yağ hücrelerine kontrollü ısı enerjisi iletir. Bu kontrollü ısı, yağ hücrelerinin doğal süreçlerle parçalanmasını desteklerken çevre dokuların korunmasına yardımcı olur.¹



Bel Bölgesindeki inatçı yağların azaltılmasına yardımcı olur¹

1

TruSculpt, hedeflenen yağ hücrelerine kontrollü ve hassas bir şekilde ısı enerjisi uygular.^{1,4}

2

Gerçek zamanlı ısı kontrolü sayesinde konforlu bir uygulama deneyimi sunar¹

3

İşlem sonrasında hedeflenen yağ hücreleri yaklaşık 12 hafta boyunca vücuttan doğal yollarla uzaklaştırılır ve daha şekilli bir görünüm oluşmasına katkı sağlar.^{1,4}

Sıkça Sorulan Sorular

TruSculpt Benim İçin Uygun Mu?

TruSculpt; karın ve bel çevrenizde daha belirgin ve konturlu bir görünüm elde etmeye yardımcı olur.^{1,3} Farklı vücut tipleri ve ölçülerine uygun yapısıyla birçok kişi için tercih edilebilir bir uygulamadır. Ancak kalp pili veya vücuda yerleştirilmiş elektronik/metalik cihazı bulunan kişiler, epilepsi hastaları, aktif kanser lezyonu olanlar veya yakın zamanda cerrahi işlem geçiren kişiler için uygun değildir.¹ Uygulama öncesinde uzmanınız; hedeflerinizi, sağlık durumunuzu ve medikal geçmişinizi değerlendirerek size uygun olup olmadığını belirleyecektir.

Kaç Seans Gereklidir?

Gözle görülür sonuçlar genellikle tek bir TruSculpt seansı sonrasında elde edilebilir.^{3,5} Kişisel hedeflerinize bağlı olarak ek uygulamalar önerilebilir.

Uygulama Sırasında Ne Hissedilir?

TruSculpt uygulaması genellikle sıcak ancak konforlu bir his olarak tanımlanır.⁶ Uygulama sırasında cilt ısısı kontrollü şekilde artırılırken konforunuzun korunması hedeflenir.¹ Gerekliğinde ısı seviyesi kişisel konforunuza göre ayarlanabilir.¹ Sonuçlar dengeli ve homojen bir görünüm sunmayı hedefler.^{1,3}

İyileşme Süresi Var Mıdır?

TruSculpt non-invaziv bir uygulamadır, iyileşme süresi gerektirmez ve işlem sonrasında günlük yaşamınıza hemen dönebilirsiniz.^{1,3} Uygulama sonrasında işlem bölgesinde yaklaşık bir saat sürebilen ısı artışı ve kızarıklık görebilirsiniz.¹

Sonuçlar Ne Zaman Görülür?

Optimal sonuçlar genellikle 12 hafta sonrasında gözlemlenir.^{3,5} Kişisel hedeflerinize ulaşmak için ek uygulamalar önerilebilir.